



**ProVap**

## **Bedienungsanleitung für ProVap RAPID 18V, batteriebetriebener Oxalsäureverdampfer**

1. Den Akku an das Gerät anschließen und 1–2 Minuten warten, bis das Sublimationsgerät aufgeheizt ist.
2. Den Sublimator vor dem Bienenstock aufstellen, sodass die Düse zum Bienenstockausgang zeigt.
3. Den Spender in die vorbereitete Oxalsäure einführen, bis er voll ist.
4. Den Spender in die obere Öffnung einsetzen und den Knopf oben auf dem Spender drücken.
5. Bis zur Sublimation sinkt die Temperatur um 10 bis 15 Grad Celsius.
6. Wenn die Temperatur zu steigen beginnt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Oxalsäure sublimiert ist und in den nächsten Bienenstock gelangen kann.
7. Der Spender kann entnommen und wieder befüllt werden.
8. Nach Beendigung der Arbeiten Batterie abziehen.
9. Reinigen des Kessels.

## **Wartung & Hinweis**

- Der Spender muss nach der Arbeit mit reichlich Wasser ausgewaschen werden, da die Oxalsäure verkleben kann.
- Lass den Akku nicht bis zum Ende der Entladung im Gerät, da dies zu einem Ausfall des Akkus führen kann.
- Wenn sich das Gerät ein- und ausschaltet, ohne dass sich die Temperatur erhöht, ist die Batterie schwach. In diesem Fall muss die Batterie entladen und durch eine voll geladene Batterie ersetzt werden.
- *Es ist verboten, das Gerät mit API Bioxal zu verwenden, da die im Arzneimittel verwendeten Hilfsstoffe in den Behälter des Gerätes einbrennen können.*

### **Kontakt**

the honey factory  
Äußere Dorfstraße 3  
08393 Dennheritz  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 176 84917415

E-Mail: [info@thehoneyfactory.de](mailto:info@thehoneyfactory.de)